

3M™ 防護マスク 9010 N95 装着方法



米国規格NIOSH N95認定品

<p>1 マスクを持つ</p> <p>ノーズクリップが上側にくるように持ちます。</p>	<p>2 立体状に形を作る</p> <p>ノーズクリップの両端をつまみ左右に広げてカップ状にします。 しめひもがマスクの表側に垂れるようにします。</p>	<p>3 片手でマスクを持つ</p> <p>ノーズクリップが上側にある事を確認し、マスクと2本のしめひもの間に手を通します。</p>	<p>4 マスクを着ける</p> <p>アゴを突き出すようにしてマスクにアゴを乗せます。</p>	<p>5 下側のしめひもを掛ける</p> <p>マスクを片手で押さえたまま下側のしめひもを首の後ろに回します。</p>
<p>6 上側のしめひもを掛ける</p> <p>上側のしめひもを頭頂部にかけます。 しめひものねじれを修正してください。</p>	<p>7 マスクを整える</p> <p>マスクの左右をつまみ、位置を合わせます。 鼻やアゴが覆われるようにイメージしてください。</p>	<p>8 ノーズクリップの調整</p> <p>両手の指で、鼻の形に合うようにノーズクリップを強く押し付けます。 鼻の周りからの漏れ込みを防止するために、必ず行ってください。</p>	<p>9 密着性の確認</p> <p>両手でマスクの表面を覆い、息を強く吐き出します。マスク周辺から空気が漏れなければOKです。漏れる場合にはノーズクリップやマスクの位置を調整してください。</p>	<p>マスクの外し方</p> <p>防護マスク不織布表面には、汚染物質が付着している可能性があります。なるべくマスク本体に触れないように注意しながら外してください。</p> <p>下側のしめひもから</p> <p>そのまま廃棄袋へ</p> <p>マスク本体に触れないように注意しながら廃棄袋へ捨ててください。</p> <p>マスクを外した後に</p> <ul style="list-style-type: none"> 手を洗う 顔を洗う うがいをする

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan. ©3M 2018. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

OHS-963-D(0218)

装着方法は携帯でも確認できます。
<http://go.3M.com/48U>

スマートフォン、一部機種ではご利用いただけない場合があります。

